


STICKu

優杖


用戶使用手冊

產品介紹


產品盒內提供配件

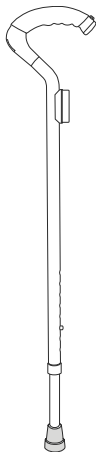


1. 優杖 x1

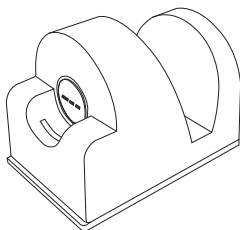

2. 充電座 x1

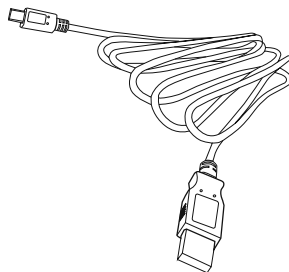


3. USB 充電線 x1

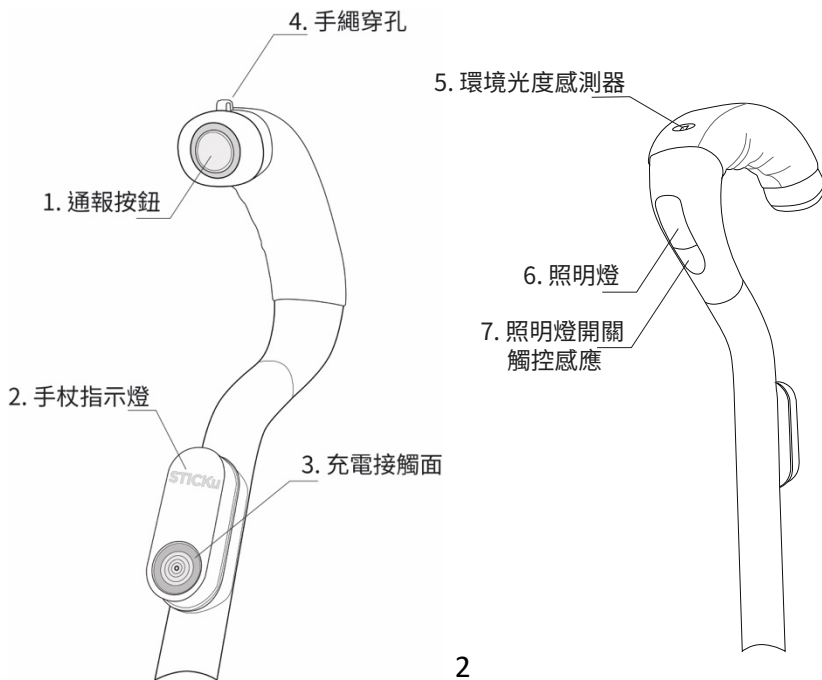

產品使用


優杖設計可供左手或右手使用，建議以下圖示手握方法，照明燈向前方，不建議握手柄過前或過後使用。

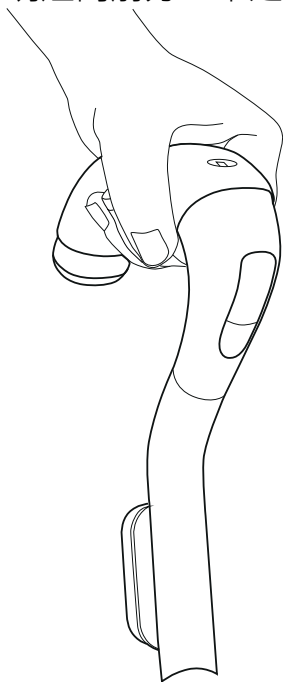

充電座

8. 優杖充電接合位

9. 充電標示燈

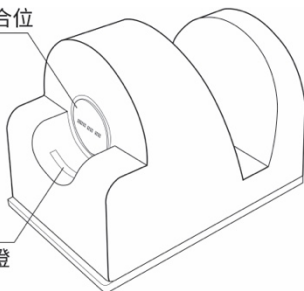


10. 重置按鈕




11. USB 電源接口

置放充電座:

利用充電座底部提供的雙面膠紙, 貼在合適的高度之固定平面上(如圖 2)

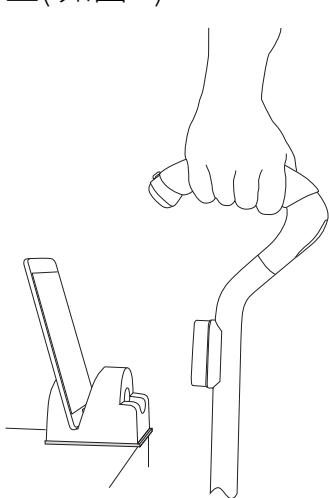

(圖 1) 優杖從充電座拿出

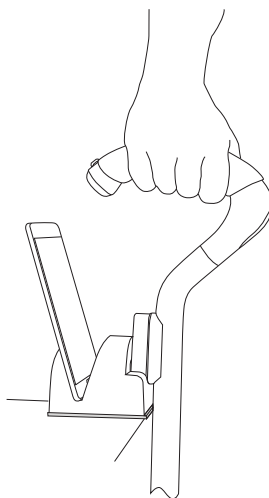

(圖 2) 放回優杖到充電座

充電

當充電座接上 USB 電源線，優杖放回充電座上(如上圖 2)，優杖便會自行充電。當優杖低電量時，請將之放於充電座上。

優杖電量	優杖指示燈 (已連接手機)	優杖指示燈 (未連接手機)
優杖電量充足	長亮綠色	不斷閃綠色
優杖低電量	長亮紅色	不斷閃紅色

優杖狀況	優杖指示燈
充電中	長亮黃色
充電完成	長亮綠色

開啟優杖

當優杖指示燈沒有閃爍，表示優杖處於關機狀態，優杖還未啟動。

長按手柄尾按鈕 2-3 秒後放手（成功開啟，優杖指示燈會不斷閃爍綠色光。(注意：通報按鈕只能用於開啟優杖，不能關機)

優杖關機

請開啟 STICKu APP，按右下方優杖圖案，於設定內選擇“優杖關機”，優杖會閃紅燈一次並自動關機。

使用需求：

本產品的使用需搭配智慧型手機

- Android 安卓手機系統版本必須為安卓 8.0 或以上；
- 蘋果 iPhone 手機系統必須為 iOS 13 或以上)

搭配之智慧型手機須保持藍芽與 GPS 定位功能開啟

安裝手機應用程式

1. 掃描以下二維碼或於手機上開啟 “Play 商店” app 應用程式

Google Play 商店



Apple App Store



STICKu

BNET-TECH Company Limited

3+


3 歲或以上

安裝

2. 按下“安裝”下載“STICKu” app 應用程式於手機上；
3. 安裝完成後，請按“開啟”按鈕以打開手機程式；



4. 首次開啟程式，需要允許程式使用權限，包括“撥打電話，管理通話，存取位置資訊，拍照，錄製影片，存取聯絡人和存取多媒體檔案”等

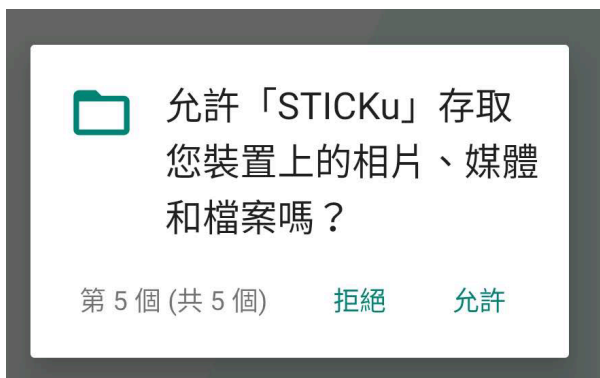

註冊 STICKu 帳戶

1. 首次開啟應用程式，輸入手機號碼並按下一步；
2. 輸入於短訊接收一次性的驗證碼；

STICKu

註冊 STICKu 帳戶

(HK) +852 -

32345678

點擊後表示您同意遵守

[使用條款及聲明](#) | [隱私政策](#)

下一步

已發送了一則 SMS 簡訊至

+85232345678

請輸入簡訊中的驗證碼

下一步

3. 填寫基本資料

編輯個人資訊

名字 32345678 >

性別 男 >

出生年月 1971-11 >

身高 (公分) 166 >

體重 (磅) 126.6 >

儲存

注意事項：

1. 首次使用前，請先將本產品充滿電；
2. 在應用程式綁定優杖之前，請確保已開啟藍牙和 GPS 定位功能。

綁定智能手機

1. 進入應用程式首頁；



2. 按右下方優杖圖示；


3. 按“優杖配對”



4. 掃描隨優杖附上之專用二維碼；



5. 顯示成功配對

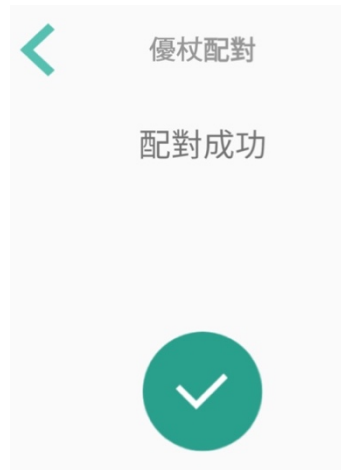

解除綁定

當優杖需要重新與另一智能手機或賬戶進行配對和綁定，已綁定的優杖需要進行以下步驟進行解綁。

- 1) 開啟手機應用程式
- 2) 按右下方優杖圖示
- 3) 選擇“進階設定”
- 4) 點按或拖拉“解除綁定”並按確定進行解除




新增聯絡人

在手機應用程式加入聯絡人，當使用者透過優杖經手機，訊息會發到這些聯絡人。

1) 在程式左下方按人像圖示, 並按 “新增聯絡人”



2) 在聯絡人清單中選擇聯絡人並按 “儲存”便可

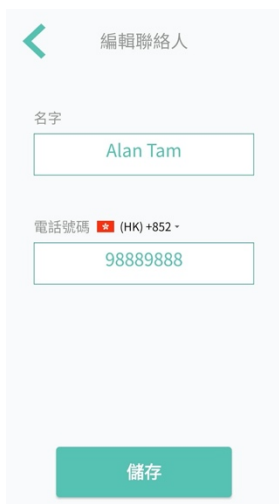

功能要點

1. 前置 LED 燈（自動開/關）

當手握優杖手柄，與此同時步行到昏暗地方，前 LED 燈會自動亮起；

當手握優杖手柄，與此同時步行到光亮地方，前 LED 燈會自動關掉；

或將手離開優杖手柄，LED 燈便會自動關掉

2. 前置 LED 燈（手動開/關）

當手握優杖手柄和 LED 照明燈亮著時，用手輕觸前方 LED 照明燈下的觸控位，便可關掉或開啟照明燈。

3. 手柄發熱（自動開/關）

當手握著優杖並環境溫度低於攝氏 15 度時，手柄便會發熱（註：發熱需時和溫度感覺，視乎天氣情況和個人感覺。）

將手離開優杖手柄，手柄發熱自動關掉。

4. 跌倒提示（手動）

當按下優杖尾端之通報按鈕，優杖便會發出聲響，手機亦會向手機程式上之聯絡人發出求助訊息及當時使用者的位置。

(此功能需要優杖先完成綁定並連接著智能手機)

5. 跌倒提示（自動）

當優杖使用中倒下，如優杖在手機程式 App 預設之時間內沒有被拿起，優杖便會發出聲響，手機亦會向手機程式 App 上之聯絡人發出求助訊息。

(此功能需要優杖先完成綁定並連接著智能手機)

6. 來電震動

當手機收到來電時，優杖手柄會發出震動提示。此功能可以於手機應用程式中自行關閉或開啟。

(此功能需要優杖先完成綁定並連接著智能手機)

7. 防遺帶提示

當優杖和已連接的智能手機超出安全距離時，優杖會發出聲響通知，同時手機亦會收到通知手機未能連接到優杖。

(此功能需要優杖先完成綁定並連接著智能手機)

固件韌體升級

打開 STICKu App, 並確認與優杖連接成功(注意: 電量應維持在充足情況下進行，標示燈應顯示綠色)，進入優杖設定，根據操作提示更新並升級最新韌體。

保養條款

購買此產品後享一年保養期。於保修期內及在正常使用該產品的情況下，BNET-TECH 對維修工作收取服務費或不進行維修工作行其獨有及絕對的酌情權作最終決定：

- 損壞是由於該產品被改造成與其包裝和使用說明書所標示的結構或規格不同而引起的；
- 未按產品使用說明書的指引使用、維修、保管該產品；
- 產品因意外造成的損壞（包括但不限於震盪、衝擊、碰撞、入水）；
- 因在非 BNET-TECH 授權維修代理店或用戶自身進行修理、改機、分解、清潔而造成的損壞；

聲明：本公司可能因印刷錯誤、最新資訊有誤或因程式及/或設備改良而隨時對本使用手冊進行修改，恕不另行通知。前述更動將納入本使用手冊之後續版本。所有圖片僅供功能說明參考，請以實際之設備及配件為準。

如需詳細資訊，請造訪 www.bnet-tech.com。

恢復原廠設定及解除綁定

恢復出廠設定，請依照以下步驟恢復優杖出廠設定

1. 把優杖放置在充電座上；
2. 用纖細物插入充電座背面近底部之重置孔，並長按 10 秒，優杖顯示燈同時會顯示為藍色；
3. 直至聽到優杖發出 "嗶嗶嗶" 3 聲，可鬆開；
4. 優杖會自行關機；
5. 優杖恢復出廠設定完成，把優杖拿開充電座，並再放到充電座上，優杖便自動重啟。

安全說明

警告（觸電風險，請勿自行拆開優杖）

小心：為降低觸電風險，請勿以任何理由拆開或進行內部零件維修。如需維修，請向合資格維修人員求助。

1. 該設備不適合高溫或受潮環境進行操作(如浴室)；
2. 請勿在孔中插入任何金屬或易燃的物品，不能阻塞任何通風孔；
3. 使用產品指示燈時，請避免靠近兒或動物的眼睛；
4. 不要靠近任何產生熱源產品，如散熱器、熱寄存器、爐灶或其他設備（包括放大器）等；
5. 請勿使用任何腐蝕性或磨損性清潔劑清潔裝置；
6. 請避免產品與液體接觸；

因充電座含有強磁性磁鐵, 小心手指避免夾傷，另外，不要讓磁鐵接近對磁場敏感的物體，例如：磁卡、電腦設備等。

產品參數

	項目	參數
優杖 (STICKu)	藍牙版本	5.0
	輸入電壓	5V
	輸入電流	1.0A
	尺寸	17cm(L), 3.8cm(W), 76-92cm(H)
	重量	~610g
	內置電池	5000mAh
	充電時間	4-6 小時
	電池類型	鋰離子聚合物電池
	<hr/>	
充電座	輸入/出 電壓	5V
	輸入/出 電流	1.0A
	尺寸	8.7cm(L), 6cm(W), 6.5cm(H)
	重量	~180g

技術支援

Email: support@bnet-tech.com (技術支援)

如欲參考最新之說明書，請到以下網址

For the latest manual in English, please visit following link.

網上電子版 (Online version): <http://www.bnet-tech.com/support>

此說明書版本為: v1.4.12c



BNET-TECH Company Limited
必靈科技有限公司